

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Yes, you can!

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

WARNING

- **DO NOT** use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the commode.
- Leg extensions with rubber tips **MUST** be in contact with the floor at all times.
- **ALWAYS** observe the weight limit on the labeling of your commode. Check that all labels are present and legible. Replace if necessary.
- Ensure that the snap buttons fully protrude through the same height adjustment hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in position and that an even height adjustment is achieved.
- Make sure that all attaching hardware, screws, nuts and/or bolts are tight at all times.
- Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them **IMMEDIATELY** if any of these conditions exist.
- If so equipped, the back tube wing nuts must be inspected regularly for tightness - otherwise injury or damage may occur.
- Before removing/installing seat and lid, allow the seat and lid to reach room temperature if exposed to cold. This will help prevent the seat clamps from breaking when being removed or installed.
- The commode seat **MUST** be installed before sitting on the commode.

Installing/Removing the Seat, Lid and Pail

Installing/Removing the Back Rail (if applicable)

NOTE: This procedure applies

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit www.invacare.com

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Yes, you can!

NOTE: Vérifiez que TOUTES les pièces sont intactes à leur arrivée. Si elles sont endommagées, N'utilisez PAS ce matériel. Prenez contact avec le distributeur ou avec le transporteur pour obtenir les instructions appropriées.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez ce produit ou aucun équipement facultatif disponible sans premiers complètement lecture et arrangement ces instructions et aucun matériel didactique additionnel tel que les manuels du propriétaire, les manuels d'entretien techniques ou les feuilles d'instruction fournis avec ce produit ou équipement facultatif. Si vous ne pouvez pas comprendre les avertissements, les attentions ou les instructions, contactez un professionnel de soins de santé, un revendeur ou un personnel technique avant d'essayer d'utiliser cet équipement - autrement, les dommages ou les dommages peuvent se produire.
- Les utilisateurs dont les capacités physiques sont restreintes doivent être supervisés ou aidés pour utiliser la chaise d'aisance.
- Les rallonges de pattes avec embouts de caoutchouc DOIVENT être en contact avec le sol en tout temps.
- Respectez TOUJOURS les limitations de poids qui figurent sur l'étiquette de votre chaise d'aisance. Vérifiez que toutes les étiquettes sont bien présentes et qu'elles sont lisibles. Remplacez-les si nécessaire.
- S'assurer que les boutons à ressort ressortent complètement des mêmes orifices de montage sur chaque rallonge de patte. Ceci permet de s'assurer que les pattes sont bien bloquées en position et qu'elles sont de niveau.
- S'assurer que TOUTES les vis, les écrous et/ou les boulons sont bien serrés en tout temps.
- Vérifier si les embouts de caoutchouc des rallonges de pattes sont déchirés, usés, fendillés ou s'il en manque. Le cas échéant, les remplacer immédiatement.
- Les écrous à oreilles du tube du dossier DOIVENT être vérifiés régulièrement pour s'assurer qu'ils sont bien serrés, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.
- Avant d'enlever/installer le siège et le couvercle, laissez le siège et le couvercle atteindre la température de la pièce s'ils ont été exposés au froid. Ceci évitera que les pinces du siège ne se brisent lorsque vous les enlèverez/installerez sur le rail du châssis arrière de la chaise d'aisance.


Installer/Enlever le siège, le couvercle et le seau

Installer

REMARQUE: Lorsque vous installez le siège sur le cadre, assurez vous que le siège est à égale distance des supports latéraux afin qu'il soit stable.

REMARQUE: NE PAS employer de force excessive en installant le siège et le couvercle.

REMARQUE: Installez d'abord le siège, puis le couvercle.

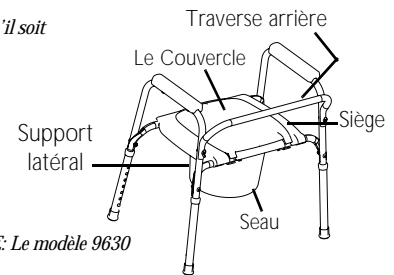

Enlever

REMARQUE: Lorsque vous retirez le siège ou le couvercle, retirez le seau, le couvercle, et ensuite le siège.

REMARQUE: NE PAS employer de force excessive en installant le siège et le couvercle.

Installer/Enlever la traverse arrière (le cas échéant)

REMARQUE: Cette procédure s'applique UNIQUEMENT aux modèles 6497 et 6500 BHD.

Installer


REMARQUE: On entend un clic quand chaque bouton à ressort est correctement encastré dans les orifices de montage.

Enlever

Régler la hauteur de la chaise d'aisance

REMARQUE: On entendra un « clic ».

REMARQUE: Assurez vous que les boutons à ressort sont bien encastrés dans les orifices de montage du niveau approprié avant utilisation.

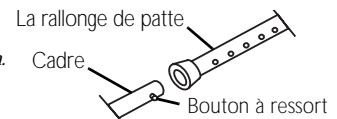

Garantie Limitée

REMARQUE: LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État à l'autre peuvent se rajouter.

Invacare garantit ce produit à vie contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel et ce, pour l'acheteur/utilisateur initial. INVACARE garantit 6559 contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel pour une période de cinq ans pour l'acheteur initial. Si, durant cette période, ce produit devait s'avérer défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'Invacare. Cette garantie ne comprend aucun frais de main-d'oeuvre ou d'envoi relié au remplacement ou à la réparation de ce produit. La seule et unique obligation d'Invacare se limite au remplacement ou à la réparation du produit.

Pour le service, contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit Invacare. Si vous n'obtenez pas un service satisfaisant, écrire directement à Invacare à l'adresse indiquée ci-dessous. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, le numéro de modèle et la date d'achat, indiquer la nature du problème et, si le produit comporte un numéro de série, indiquer ce dernier.

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être retournées pour vérification de garantie, en indiquant le numéro de série, s'il y a lieu, et dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l'autorisation de retour. NE PAS retourner un produit à l'usine sans d'abord avoir obtenu notre consentement. Les envois C.O.D. (payables sur réception) seront refusés. Veuillez payer à l'avance les frais d'envoi.

RESTRICTIONS: LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE, OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. DE PLUS, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ EFFACÉ OU MODIFIÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INADÉQUATEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LA MODIFICATION AVEC DES PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS, AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS FAITES SANS L'APPROBATION D'INVACARE, OU AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, AUX PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN FOURNISSEUR AUTORISÉ INVACARE, ET L'ÉVALUATION SERA FAITE PAR INVACARE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE EST EXCLUSIVE; ELLE S'APPLIQUE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE. EN PARTICULIER, ELLE REND NULLE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE POUR UNE UTILISATION QUELCONQUE. LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION D'UNE GARANTIE QUELCONQUE EST LIMITÉ À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE IMPLICITE NE S'ENTEND AU DELÀ DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LA RESPONSABILITÉ DE INVACARE N'EST EN AUCUN CAS ENGAGÉE EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS.

CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÉGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).

Invacare Corporation

www.invacare.com

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada
570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation unless otherwise noted.

© 2008 Invacare Corporation

Part No 1148075

Rev B - 07/08



Yes, you can!